

シャンプーボール（取り扱い説明書）

① 平（水平）な所に設置

② キャスターをロックする

（前2箇所、安定が悪い時は4か所）



③ ポール（支柱）を上げる

支柱の黒いダイヤルを左に回し緩める（少し回転）



高さ調整は3段階 GL からネック 650mm

中段 GL からネック 725mm

上段 GL からネック 780mm

シャンプーボール上部を真上に引き上げる（1Cm で止まる）、その状態で左に止まるところまで回す。

次にその状態で真上に引き上げ止まったら右に回して元の位置に戻す（上段固定）。

中段での使用は、ゆっくり上げる途中カッタと音がしたらそこで右に回し固定する。



※支柱の黒いダイヤルを
右に回して必ず固定する



④ 給排水ホースの接続

排水ホース

(右に回して接続)



給湯ホース

(カチッとするまで押し込む)



シャンプーボールの撤去

※シャンプーボールシャワーを出した状態で、給湯の元の蛇口を止める（水圧をなくす）

給湯ホースの白い部分を持って下にひくと外れます。



上部リングを左に回して排水ホースを外す。



シャンプーボール上部を下げる

支柱ダイヤルを左に回して緩める

上部シャンプーボールを止まるところまで持ち上げる

シャンプーボールを左に止まるところまで回す

その状態で下まで下げる

最後に上部を右に回して戻す

